

ORTOPEDIA COLUMNA LUMBAR

Fajas, órtesis de columna,
cinturón costal, corrector de postura
e inmovilizador de clavícula



FAJAS

Adultos Mayores



Faja de neopreno para soporte lumbar

Código: BK-008

Marca: Super Confort

Color: ●

Faja para soporte lumbar elaborado en neopreno.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con acojinamiento posterior en área lumbar y varillas semirrígidas.
- Sistema de ajuste frontal y lateral por medio de bandas de cierre por contacto
- Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extragrande



Faja abdominal

Marca: Blunding

Color: ●

Soporte sacrolumbar y abdominal, confeccionado con cuatro bandas de elástico afelpado, libre de látex.

INDICADA PARA:

- El postoperatorio de cirugías abdominales.
- En hernias abdominales.
- En pacientes sometidos a abdominoplastia y liposucción

CARACTERÍSTICAS:

- Ajustable con cierre de contacto.
- Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
- Cierre de contacto: 100% Nylon

Talla: S TA413-S

Talla: M TA413-M

Talla: L TA413-G

Talla: XL TA413-XL

FAJAS

Adultos Mayores



Faja sacrolumbar flexible

Marca: Medway

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Ayuda a disminuir el dolor de espalda en la región sacrolumbar causado por esguinces, dolor muscular y torceduras. Gracias a su compresión, ayuda a estabilizar la región abdominal y sacro lumbar generando un mayor alivio.
- 6 varillas de soporte.
- Ajuste con doble correa.
- Su diseño ayuda a tener comodidad en las actividades diarias.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

- NO SUMERGIR EN AGUA.
- Los velcros no se deben mojar.
- Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.

Talla:	S	75-85cm	6180976528136	\$638
Talla:	M	90-100cm	6180976528143	\$638
Talla:	L	100-110cm	6180976528150	\$638
Talla:	XL	110-120cm	6180976528167	\$755



Faja sacro lumbar elástica con varilas flexibles

Marca: Bionika

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada con elástico de alta calidad.
- Cuenta con dos varillas de aluminio moldeable en la parte de atrás (zona lumbar).
- Tiene, además, refuerzo al frente de elástico doble.
- El ajuste es con contactel.

Talla:	S	2312200	Talla:	XL	2312500
Talla:	M	2312300	Talla:	XXL	2312600
Talla:	L	2312400			

FAJAS

Adultos Mayores



Faja cinturón sacro lumbar con soporte acojinado

Código: A05

Marca: Tynor

Color: ●

Faja sacrolumbar diseñada con un soporte acojinado en la espalda, con el fin de proporcionar un apoyo confortable mientras alivia el dolor lumbar.

Esta faja puede utilizarse en la rutina diaria y como terapia profiláctica.

CARACTERÍSTICAS:

- Durable.
- De material extra poroso con alto grado de elasticidad.
- Mecanismo de doble fijación.
- Provista de un panel posterior hecho de una hoja de polipropileno flexible y acojinado para mayor comodidad del paciente.
- Varillas flexibles.

USOS Y APLICACIONES:

- Síndrome del disco vertebral.
- Atención posterior a cirugías discales.
- Dolor de espalda baja, fatiga, deformidades y tensiones mecánicas debido a una mala postura.
- Dolor de la región lumbar producto de la osteoporosis.
- Comodidad durante largas horas de trabajo y los viajes.
- Estabilización de la fractura vertebral y en lesiones.
- Inmovilización temporal para las víctimas en accidentes durante el rescate y el traslado.

Talla:	S	70 a 80 cm
Talla:	M	80 a 90 cm
Talla:	L	90 a 100 cm
Talla:	XL	100 a 110 cm
Talla:	XXL	110 a 120 cm

(MEDIDA CON LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA INMEDIATAMENTE DEBAJO DEL OMBLIGO)



Faja sacro lumbar con varilla rígida

Código: A07

Marca: Tynor

Color: ●

Científicamente diseñada para dar soporte e inmovilizar la región lumbosacra y corregir deformidades posturales, aliviando el síndrome de dolor lumbar. Con varillas rígidas de aluminio, maleables y contorneadas que pueden moldearse para lograr una postura correcta y una inmovilización más eficaz.

CARACTERÍSTICAS:

- Mecanismo de doble tracción.
- Férulas rígidas preformadas.
- Provista de una almohadilla posterior, que ofrece un mayor grado de amortiguación, además de ser de uso cómodo sin comprometer la inmovilización.
- Alto grado de inmovilización.

USOS Y APLICACIONES:

- Espondilitis lumbar.
- Síndrome del disco vertebral.
- Atención posterior a cirugías discales.
- Dolor de espalda baja, fatiga, deformidades y tensiones mecánicas debido a una mala postura.
- Dolor de la región lumbar producto de la osteoporosis.
- Comodidad durante largas horas de trabajo y los viajes.
- Estabilización de la fractura vertebral y en lesiones.
- Cambios degenerativos de la columna vertebral.
- Debilitamiento de los músculos abdominales.

Talla:	S	70 a 80 cm
Talla:	M	80 a 90 cm
Talla:	L	90 a 100 cm
Talla:	XL	100 a 110 cm
Talla:	XXL	110 a 120 cm
Talla:	XXXL	120 a 130 cm

(MEDIDA CON LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA INMEDIATAMENTE DEBAJO DEL OMBLIGO)

ORTESIS DE COLUMNA

Adultos Mayores



Órtesis de columna lumbar para estabilización con barras de refuerzo

Código: Vertebradyn® Stabil 07410

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADO PARA:

- Columna vertebral conservador/ post-operatoria
- Daño del disco intervertebral
- Lumbalgia
- Leve inestabilidad de la columna lumbar
- Estabilización preventiva
- Espondilolistesis
- Espondilosis
- Osteocondritis

EFEECTO:

- Mejora de la postura.
- Alivio, corrección del exceso de lordosis y estabilización de la columna lumbar.
- Barras de refuerzo para una mayor estabilidad pasiva.

Talla:	XS	70 – 80 cm
Talla:	S	80 – 90 cm
Talla:	M	90 – 100 cm
Talla:	L	100 – 110 cm
Talla:	XL	110 – 120 cm
Talla:	XL	120 – 130 cm

ORTESIS DE COLUMNA

Adultos Mayores



Órtesis de puente de columna lumbar para alivio y corrección

Código: Vertebradyn® Force 07428

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADO PARA:

- Conservador / post-operatorio
- Inflamación, degeneración
- Para aliviar la columna lumbar mediante reducción de la lordosis
- Lumbociatalgia severa con déficit muscular con protuberancias / prolapsos importantes del disco intervertebral sin una indicación absoluta de cirugía
- Síndrome lumbar pseudo-radicular, radicular severo
- Espondilolistesis con ciática lumbar recurrente
- Deformidad lumbar grave en el síndrome facetario / osteoartritis
- Fracturas vertebrales

EFFECTO:

- Reducción de la lordosis.
- La movilidad y carga del torso son transmitidos a la pelvis.
- Reducción de los movimientos rotatorios.

Talla:	XS	70 – 80 cm
Talla:	S	80 – 90 cm
Talla:	M	90 – 100 cm
Talla:	L	100 – 110 cm
Talla:	XL	110 – 120 cm
Talla:	XL	120 – 130 cm

ORTESIS DE COLUMNA

Adultos Mayores



Órtesis de puente de columna lumbar para alivio y corrección

Código: Vertebradyn® Vario 07420

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADO PARA:

- Conservador / post-operatorio
- Prolapso de disco
- Después de la cirugía de disco intervertebral con un prolapso pequeño o mediano
- Estenosis del canal espinal
- Inestabilidad de la columna
- Dolor lumbar agudo y severo
- Lumbociática moderada
- Irritación de la articulación sacroilíaca
- Osteocondritis
- Espondilolistesis

EFFECTO:

- Descarga parcial por medio de un aumento de la presión intraabdominal.
- Reducción de la lordosis.
- Movilización al retirar los elementos de tracción y/o remover las almohadillas.
- Efecto adicional de masaje sobre la región lumbar y sacra.
- Resortes de acero elásticos integrados.

Talla:	XS	70 – 80 cm
Talla:	S	80 – 90 cm
Talla:	M	90 – 100 cm
Talla:	L	100 – 110 cm
Talla:	XL	110 – 120 cm
Talla:	XL	120 – 130 cm

ORTESIS DE COLUMNA

Adultos Mayores



Órtesis dinámica para enderezar y estabilizar

Código: Vertebradyn® Osteo

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADO PARA:

- Osteoporosis.
- Fracturas estables de cuerpos vertebrales en el área de la columna torácica / lumbar.
- Terapia conservadora para la cifosis secundaria.
- Deformidad cifótica.
- Insuficiencia muscular.
- Espondilitis anquilosante (enfermedad de Bechterew).
- Enfermedad de Scheuermann.

EFECTO:

- Soporte activo, descarga y estabilización de la columna vertebral.
- Efecto dinámico de inclinación. La férula elástica de inclinación mantiene la rectificación de la columna.
- La férula telescópica sigue al movimiento del cuerpo, esto evita que la órtesis se deslice hacia arriba.
- Ajuste continuo de la presión correctiva.

Talla: Formada por 2 componentes: Osteo espinal y osteo lumbar.

127435-0 OSTEO Espinal 0	\$ 7.170,00
127435-1 OSTEO Espinal 1	\$ 7.170,00
127435-0 OSTEO Espinal 2	\$ 7.170,00
127435-1 OSTEO Espinal 3	\$ 7.170,00
17435XS OSTEO lumbar XS	\$ 4.584,00
17435XS OSTEO lumbar S	\$ 4.584,00
17435XS OSTEO lumbar M	\$ 4.584,00
17435XS OSTEO lumbar L	\$ 4.584,00
17435XS OSTEO lumbar XL	\$ 4.584,00
17435XS OSTEO lumbar XXL	\$ 4.584,00

ORTESIS DE COLUMNA

Adultos Mayores



Talla:	XS	75 – 85 cm
Talla:	S	85 – 95 cm
Talla:	M	95 – 105 cm
Talla:	L	105 – 115 cm
Talla:	XL	115 – 125 cm

Órtesis pélvica para estabilización y descarga

Código: Vertebradyn® lsg 07158
Marca: Sporlastic
Color: ●

INDICADO PARA:

- Síndrome sacroilíaco
- Inestabilidad sacroilíaca
- Bloqueo sacroiliaco
- Estabilización preventiva
- Síndrome de dolor miofascial
- Tendinitis pélvica
- Inestabilidad del anillo pélvico
- Apertura de la sínfisis
- Inestabilidad sinfisial
- Tratamiento conservador de una fractura sacra

EFFECTO:

- Estabilización y descarga de la región pélvica completa.
- Efecto de empuje hacia el centro del cuerpo por las almohadillas de silicona.
- Masaje permanente y enfocado sobre la articulación sacroilíaca.

ORTESIS DE COLUMNA

Adultos Mayores



Soporte de columna lumbar con almohadilla de silicona AIR-MATRIX para una estabilización óptima

Código: Vertebradyn® Supreme Senso 07545

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADO PARA:

- Tratamiento conservador.
- Dolor lumbar.
- Desequilibrios musculares.
- Síndrome de Irritación radicular.
- Estenosis del canal espinal.
- Estabilización preventiva.

EFECTO:

- MATRIZ DE AIRE SPORLASTIC almohadilla de silicona con forma anatómica para propiocepción.
- Facilitación de la corrección del exceso de lordosis, trabajo fisiológico de músculos y aumento de la resistencia.
- Corrección del exceso de lordosis a través acumulación de presión en el área abdominal.
- Ensanchamiento del canal medular de la columna.
- Estimulación del tono a través de masaje de fricción.

Talla:	XS	70 – 80 cm
Talla:	S	80 – 90 cm
Talla:	M	90 – 100 cm
Talla:	L	100 – 110 cm
Talla:	XL	110 – 120 cm
Talla:	XL	120 – 130 cm

CINTURÓN COSTAL

Adultos Mayores



Cinturón para costilla masculino

Código: 3068162310846

Marca: Medway

Color: ●

Proporciona un soporte óptimo para la caja torácica, ayuda a curar y proteger las costillas fracturadas, dislocadas, rotas o agrietadas. Para apoyo post-operatorio e inmovilización del área del pecho después de cirugía a corazón abierto o torácica, esternotomía, fracturas de esternón y fracturas de costillas.

CARACTERÍSTICAS

- Tela y material transpirable.
- Muy cómodo para uso diario.
- Fácil de usar.
- Talla : Universal

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- *NO SUMERGIR EN AGUA.
- *Los velcros no se deben mojar.
- Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Tome con sus manos ambos extremos del cinturón para las costillas.
2. Coloque la parte central por detrás de la espalda al nivel de la caja torácica inferior.
3. Ajuste el cinturón.

CINTURÓN COSTAL

Adultos Mayores



Cinturón para costilla femenino

Código: 3070193167238

Marca: Medway

Color: ●

Proporciona un soporte óptimo para la caja torácica, ayuda a curar y proteger las costillas fracturadas, dislocadas, rotas o agrietadas. Para apoyo post-operatorio e inmovilización del área del pecho después de cirugía a corazón abierto o torácica, esternotomía, fracturas de esternón y fracturas de costillas.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con elástico duradero.
- Varillas flexibles para soporte de espalda.
- Material transpirable.
- Muy cómodo para uso diario.
- Fácil de usar.
- Talla : Universal

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- *NO SUMERGIR EN AGUA.
- *Los velcros no se deben mojar.
- Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Tome con sus manos ambos extremos del cinturón para las costillas.
2. Coloque la parte central por detrás de la espalda al nivel de la caja torácica inferior.
3. Ajuste el cinturón.

INMOVILIZADORES

Adultos Mayores



Soporte para pecho

Marca: Medway

Color: ●

El soporte para pecho se aplica en la región torácica para comprimir y envolver la caja torácica y ofrecer una fijación del esternón a la vez que permite una flexibilidad suficiente para una respiración cómoda.

USOS

- Para estabilización en fracturas del esternón.
- Uso posterior a cirugía cardiotorácica.
- Protege y une las incisiones quirúrgicas en el pecho.
- Facilita el proceso de expulsión de las flemas de los pulmones después de la cirugía.
- Almohadilla anatómica.
- Compresión controlada.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el centro de la almohadilla sobre el esternón y ajuste con cuidado la banda elástica.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- NO SUMERGIR EN AGUA
- *Los velcros no se deben mojar.
- Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.

Talla: L 6180975574233

Talla: XL 6180975574240

CORRECTOR DE POSTURA

Adultos Mayores



Corrector de postura

Código: PWR-01-1117

Marca: Benesta

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Correcta postura.
- De ajuste fácil y cómodo.
- Diseñada para brindar confort.
- Inmoviliza y da soporte a la clavícula.
- Ideal para reducir la factura de la clavícula.

Talla:	S	78 - 86 cm
Talla:	M	84 - 92 cm
Talla:	L	90 - 98 cm
Talla:	XL	96 - 106 cm

INMOVILIZADORES

Adultos Mayores



Inmovilizador y soporte para clavícula

Código: 4245667895798

Marca: Medway

Color: ●

Para fracturas de clavícula, dislocaciones, lesiones de tejidos blandos y ayuda a corregir la postura.

CARACTERÍSTICAS

- Material de Espuma/terciopelo.
- Fácil ajuste.
- Anillos ajustables verticalmente.
- Velcro nueva generación.
- Talla : Universal



Inmovilizador de clavícula

Marca: Somex

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para mantener los hombros hacia atrás y limitar el movimiento de la clavícula durante el tratamiento de una fractura.
- Su diseño en forma de ocho cuenta con correas ajustables para una cómoda aplicación.

Talla:	S	OSCLBB-CH
Talla:	M	OSCLBB-M
Talla:	L	OSCLBB-G
Talla:	Pediatrico	OSCLBB-P

CORSETS

Adultos Mayores



Corset Jewett

Marca: Ortobionika

Color: ☐

Un corset Jewett es una ortesis dorso lumbo sacra, que aporta cierto grado de inmovilización de la columna, impidiendo la flexión torácica y movimientos antero posteriores, pero permitiendo flexionar por la zona de la cadera.

Está diseñado especialmente para mantener la columna dorsolumbar en hiperextensión aumentando la lordosis lumbar y se basa en la aplicación de tres puntos de presión: dos de ellos ejercen la fuerza en la misma dirección; uno a la altura del esternón y otro a la altura del pubis por la cara anterior, y un tercer punto ejerce una contra fuerza de dirección opuesta a los anteriores sobre la zona dorsolumbar.

Todas las placas de apoyo están acolchadas para proporcionar mayor comodidad al paciente, así como las bandas laterales tienen formas rectas para una buena regulación vertical.

COMPOSICION:

- Fabricado en aluminio de alta calidad.
- Cuenta con soportes laterales y centrales.

Talla:	S	2333200
Talla:	M	2333300
Talla:	L	2333400
Talla:	XL	2333500

CORSETS

Adultos Mayores



Corset Taylor

Marca: Ortobionika

Color: ●

El corset de Taylor proporciona un soporte completo y una cobertura integral a las secciones de la columna torácico-lumbo-sacra.

La inmovilización de la columna se logra con las dos barras paraespinales rígidas, que evitan tanto la férula pélvica evita la rotación de la parte superior del torso.

COMPOSICION:

- Fabricado de aluminio de alta calidad.
- Cuenta con cintas y peto para su ajuste.

Talla:	S	2331200
Talla:	M	2331300
Talla:	L	2331400
Talla:	XL	2331500



— cirugía y ortopedia —

 **844 204 4071**



@OrtedOrtopedia

Plaza Callas
Blvd. Venustiano Carranza 5945 4,
Col. Rancho de Peña, 25210 Saltillo, Coah.